

FOCUS ON THE DOC

GRZEGORZ ZIĘTEK, DDS



Ha terminato gli studi nel 1999 nel Dental Institute dell'Università Jagellonica. Ha lavorato nell'ambulatorio di emergenza centrale di Clinica Universitaria Jagellonic negli anni 2000 - 2005. Proprietario di clinica privata e centro educativo in Cracovia dal 2003. Dal 2007 è membro dell'Associazione Polacca di Implantologia (PSI), Associazione Tedesca di Implantologia Orale (DGOI), Congresso Internazionale di Implantologia Orale (ICOI) e ICOI Europa. Nel 2013 diventa membro del consiglio della Società Polacca di Implantologia. Dal 2011 opinion leader di BEGO Implant Systems e del loro consulente medico in Polonia. Nel 2011 FELLOWSHIP di PSI, ICOI, DGOI. Nel 2013 DIPLOMATO di PSI, ICOI, DGOI. Attualmente insegna in Polonia e all'estero (ha tenuto lezioni in Croazia, Giappone, Vietnam, Albania). Autore di pubblicazioni in Polonia e all'estero.

Per maggiori info:

Esacrom srl
VIA ZAMBRINI,6/A-40026 IMOLA(BO)
TEL. +390542643527 FAX
+390542482007
www.esacrom.com
comm@esacrom.com



Follow us on



@esacromsrl



Surgyonic®

ESACROM & ZIĘTEK presenta


«CrestaLift» Concept




A cura del Dr. Grzegorz Zietek, DDS (Pol)




PROCEDURA STEP BY STEP

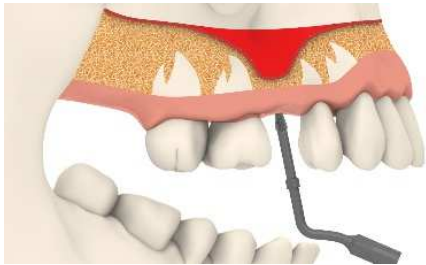


1- Posizionamento della punta;

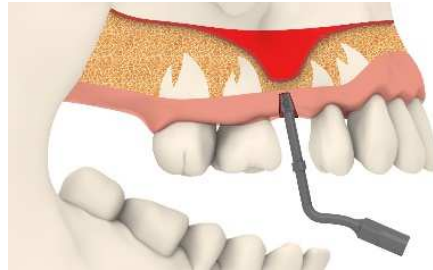


2- Realizzazione del foro.

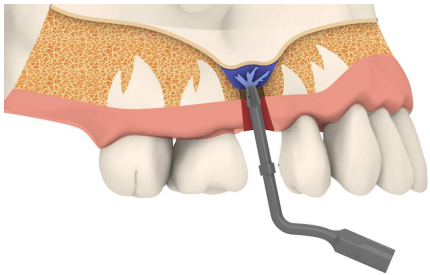


3- Rialzo tramite il getto in testa;

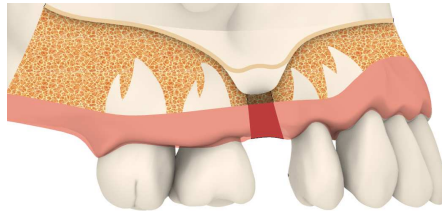

4- Accesso al seno con espansione di diametro.

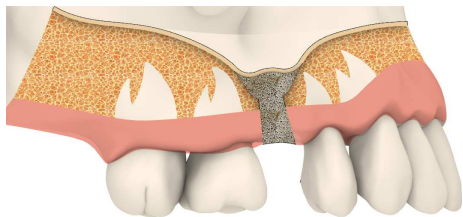

5- Preparazione del sito e posizionamento di biomateriale;

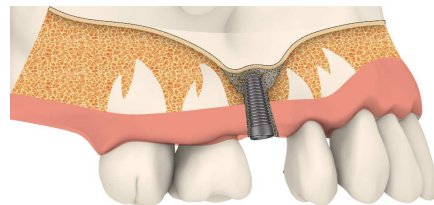

6- Posizionamento dell'impianto.

CLINICAL CASE



PUNTE DEDICATE

ESOMCT

Punta conica micro-affilata adatta per mini rialzo di seno. Irrigazione interna in testa.



U	40	} MODALITA' SWEEP O MODALITA' SURGERY
V	80	
P	80	
MAX POWER	50	