

Applicazioni Surgysonic in Veterinaria

Osteotomie e ferite difficili

Materiale cortesia del Dott. Riccardo Rinnovati, DVM, Phd, Università di Bologna Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.



CLINICAL CASES

**CAVALLO, 4 ANNI,
LESIONE CRONICA DA TRAUMA**



PRIMO TRATTAMENTO



ULTIMO TRATTAMENTO

CLINICAL CASES

**PULEDRO, 15 GIORNI,
PIAGA**



PRIMO TRATTAMENTO



TERZO TRATTAMENTO



UNDICESIMO TRATTAMENTO

INSERTI DEDICATI

ES004T



DATI TECNICI E PARAMETRI D'UTILIZZO

∅: 4,4 mm
Lo: 0,47 mm
La: 12 mm

U 20
V 40
P 100
MAX POWER 50

Punta a forma conica per stimolazione tessuti perilesionali e interni alla ferita.
NON AFFILATA.


OSTEOTOMIE

**Facilità di
esecuzione**

**Taglio netto e
preciso**

**Minor incidenza
periositi**

RX PRE-OPERATORIE

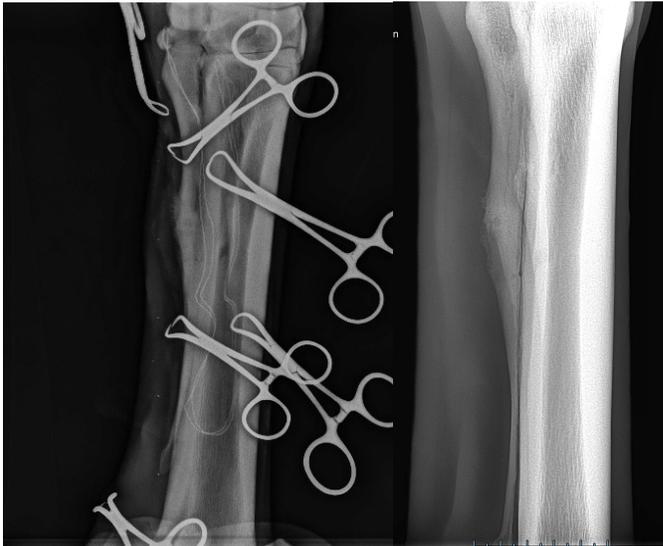

RX POST-OPERATORIE



INSERTI DEDICATI

ES007T



DATI TECNICI E PARAMETRI D'UTILIZZO

Sp: 0,6 mm
Lo: 12 mm
La: 14 mm

U 45
V 80
P 100
MAX POWER 70

Punta a 5 denti, utilizzata per osteotomie ad alta efficienza.
SEGHETTATA.

VANTAGGI

**DETERSIONE E
PULIZIA PROFONDA
DELLA
PIAGA/FERITA**

**RIDUZIONE DEI
TEMPI DI
TRATTAMENTO E
RECUPERO**

**RIDUZIONE
DELL'ESSUDATO**

**EFFETTO
CAVITAZIONE
BATTERICIDA**

DR. RICCARDO RINNOVATI



Il **Dott. Riccardo Rinnovati**, è Ricercatore presso l'Università di Bologna e lavora presso l'Unità di Chirurgia del Servizio Clinico Degli Equini del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.

Efficacia testata sul cavallo presso l'Unità di Chirurgia del Servizio Clinico Degli Equini del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna.

SCOPRI IL NOSTRO MONDO AD ULTRASUONI!

Seguici su     @esacromsrl

Sui nostri profili social trovi continui aggiornamenti
sulla formazione targata #Esacrom,
partecipa ai nostri corsi ed eventi esclusivi per saperne di più!

Per ulteriori informazioni contattare:

Esacrom srl

Via Zambrini 6/A-40026 IMOLA(BO)

TEL. +390542643527 FAX +390542482007 esacrom@esacrom.com